

## Produktinformasjon for Navina Classic

### Produktbeskrivelse

Transanalt irrigasjonssystem med manuell kontrollenhet.

### Holdbarhet og bruk

Alle komponenter i Navina Irrigation System har en holdbarhet på 3,5 år, bortsett fra Navina-katetre og Navina Cone, som har holdbarhet 2 år. Når Navina-komponenter er pakket i sett, bestemmer komponenten med kortest holdbarhet settets holdbarhet.

Navina katetre og coner er til engangsbruk, vannbeholderen kan brukes 15 ganger, og Navina Classic-kontrollenhet og slangesett kan brukes 100 ganger.

### Materiale

**Katetermateriale:** Styren-etylen-butylen-styren (SEBS) / polypropylen (PP) med et hydrofilt belegg av polyvinylpyrrolidon (PVP).

**Materiale i primæremballasje:** PE/PET-pose.

**Materiale i sekundæremballasje:** papp og bølgepapp.

### Tiltenkt bruk

Navina Systems skal benyttes til transanal irrigasjon ved å instillere vann opp i nedre del av kolon gjennom et rektalkateter.

### Indikasjoner for bruk

Navina Systems er indisert for å hjelpe voksne og barn fra 3 år som lider av avføringslekkasje, kronisk obstipasjon og/eller tidkrevende tarmtømming. Ved å instillere vann i nedre del av kolon kan de peristaltiske musklene i tarmen stimuleres til å starte tømming av innholdet i nedre kolon og rektum.

### Kontraindikasjoner

**IKKE** bruk Navina Systems hvis ett eller flere av de følgende alternativene gjelder for deg:

- Kjent anal eller kolorektal stenose.
- Aktiv inflammatorisk tarmsykdom.
- Akutt divertikulitt.
- Kolorektal kreft.
- Iskemisk kolitt.
- Det har gått mindre enn tre måneder siden du fikk utført anal eller kolorektal kirurgi.
- Det har gått mindre enn 4 uker siden endoskopisk polypektomi.

Siden listen ikke nødvendigvis er uttømmende, kommer helsepersonellet alltid til å ta hensyn til individuelle faktorer hos brukeren.



### Navina Classic System

Referanse	Type	Spesifikasjon
6900512	Navina Classic System regulær	1 Navina Classic-kontrollenhet 1 vannbeholder 1 slangesett
6900712	Navina Classic System liten	2 rektalkatetre
6901712	Navina Classic System-cone	1 Navina-oppbevaringsveske 1 tilbehørssett
6900620	Navina Classic System Regulær refill	1 Navina Classic-kontrollenhet
6900820	Navina Classic System Liten refill	1 vannbeholder 1 slangesett
6901820	Navina Classic System Conerefill	2 rektalkatetre
6900310	Navina forbrukssett regulær	1 vannbeholder
6900410	Navina forbrukssett liten	15 rektalkatetre
6901610	Navina forbrukssett cone	
6894010	Navina katetersett regulær	10 rektalkatetre
6894310	Navina katetersett liten	
6901110	Navina slangesett	1 kateterslange 1 slange til vannbeholder
69012	Navina-tilbehør	2 griperinger (1 vertikal, 1 horisontal) 1 snor 1 festestropp 1 festeklips for Navina Smart
6901310	Navina Classic-kontrollenhet	1 Navina Classic-kontrollenhet

Navina™ Classic

